



nocospray®

enhanced disinfection: simplified
la désinfection évoluée, simplifiée.



Manuel de l'utilisateur

www.nocospray.ca

Table des matières

Qu'est-ce que le système Nocospray®?	3
Comment l'utiliser	4
Nettoyage et entretien	5
Quelques consignes.	6
Dépannage.	8
Spécifications techniques	10
Notes	11
Garantie	12

Important

- Des circonstances spécifiques d'utilisation peuvent faire varier le nombre et l'ordre des étapes à suivre.
- Suivez toujours le protocole de nettoyage de votre établissement avant de désinfecter avec le système Nocospray®.
- Pour toute question, communiquez avec votre représentant AMG ou avec le service à la clientèle au 1-800-361-2210.

Qu'est-ce que c'est ?

Le système Nocospray® est composé de deux parties : un appareil de propulsion breveté, facile à transporter, et le désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène spécialement formulé pour agir en synergie avec l'appareil.


Lorsqu'utilisé tel qu'indiqué, ce système peut désinfecter toutes les surfaces dures comprises dans une aire fermée.

Le dosage est déterminé par le volume de la pièce à traiter.



Comment l'utiliser

1. Retirez tout objet mou ou poreux de la pièce, incluant les items jetables (ex. : draps, nourriture déjà ouverte).
2. Effectuez un nettoyage manuel conformément au protocole en vigueur dans votre établissement.
3. Fermez les fenêtres et toute ventilation excessive (ex. : système à pression négative).
4. Assurez-vous que toutes les surfaces dures peuvent être atteintes par les vapeurs de Nocolyse : par exemple, ouvrez les portes de salle de bains et les tiroirs. Placez le matelas en équilibre sur le côté afin qu'une plus grande partie de sa surface puisse être désinfectée.
5. Placez le Nocospray sur une table ou un chariot à environ 1m du sol, avec la buse non-obstruée et orientée vers le centre de la pièce.
6. Calculez le volume de la pièce en mètres cubes (m^3). Pour un effet sporicide, multipliez le volume par 7.

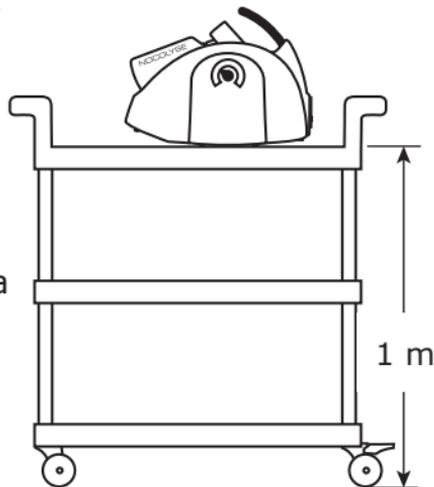

7. Installez la bouteille de Nocolyse.
 - Assurez-vous que la quantité de liquide est suffisante pour traiter la pièce.
 - Assurez-vous d'entendre un "clic".
8. Branchez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur à l'arrière de l'appareil (lumière verte).
9. Réglez le volume selon le résultat obtenu à l'étape 6 (m³). Un voyant lumineux indiquera le volume choisi. Lorsque deux voyants sont allumés, le volume choisi est situé entre les deux.
10. Assurez-vous de pouvoir quitter la pièce facilement. Personne ne doit être dans la pièce durant la désinfection avec Nocospray.
11. Appuyez sur le bouton situé sur le côté de l'appareil. Vous entendrez une alarme indiquant que le traitement commence dans 15 secondes.
12. Quittez la pièce et fermez la porte.
13. Notez l'heure à laquelle vous pourrez entrer à nouveau dans la pièce. Bloquez ou verrouillez la porte et apposez les enseignes ou indicateurs appropriés.

Nettoyage et entretien

Vous pouvez nettoyer le revêtement extérieur de l'appareil avec de l'eau et du savon. Les détergents durs comme l'eau de javel peuvent endommager sa surface, mais ne l'empêcheront pas de fonctionner. Aucune désinfection n'est nécessaire.

Quelques consignes

À faire :

- Pour de meilleurs résultats, relisez régulièrement ce manuel et les outils de formation en ligne. Cela vous aidera à utiliser le système Nocospray de façon constante et optimale. Vous trouverez les outils en ligne à l'adresse suivante : **www.nocospray.ca/fr/outils-clients** Pour y accéder, vous devrez obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe en vous inscrivant sur le site.
- Discutez avec l'équipe AMG des endroits où vous utilisez le système. Il s'agit de votre meilleure ressource pour vous aider à adapter vos protocoles aux besoins de votre département et/ou établissement.
- Indiquez immédiatement la date sur chaque bouteille de Nocolyse ouverte, puis utilisez-la dans les 2 mois suivant cette date.
- Contactez votre représentant AMG pour planifier une inspection semi-annuelle.
- Retirez et fermez la bouteille de Nocolyse lorsque l'appareil est rangé ou déplacé.
- Gardez l'appareil sur un chariot qui lui est dédié, avec les bouteilles de Nocolyse et les accessoires. C'est la meilleure façon de prévenir les dommages accidentels et de vous assurer que le système est toujours prêt à être utilisé.

Ne pas :

Utiliser un liquide autre que Nocolyse avec l'appareil Nocospray. Cela pourrait l'endommager et compromettre vos résultats. Tout dommage causé par l'utilisation d'un liquide autre que Nocolyse, ou après avoir ouvert ou modifié l'appareil ne peut être couvert par aucune garantie ou contrat de service.

Ne pas :

Ouvrir l'appareil Nocospray. Bien qu'il soit facile à transporter et à utiliser, il contient néanmoins des composants électroniques et mécaniques qui peuvent être endommagés. Aucune garantie ou contrat de service ne couvre les dommages causés par le fait d'ouvrir ou de modifier l'appareil.

Ne pas :

Faire un usage abusif de l'appareil. Les dommages causés par une utilisation abusive, dangereuse ou irresponsable ne sont couverts par aucune garantie. Cela inclut tirer la prise murale par le cordon d'alimentation ou utiliser ce dernier comme une poignée. Nous vous rappelons que la meilleure façon de prévenir les dommages accidentels et de vous assurer que le système est toujours prêt à être utilisé est de le garder sur un chariot qui lui est dédié.


Dépannage

Arrêt d'urgence

Le Nocospray peut être éteint à tout moment en fermant l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil (la lumière verte s'éteindra) ou en débranchant l'appareil.

Si vous devez entrer dans la pièce alors que l'appareil est en marche ou avant la fin du temps de contact, assurez-vous de porter l'équipement de protection personnelle approprié et de passer le moins de temps possible dans la pièce. Personne ne devrait être dans la pièce (patient ou personnel) jusqu'à ce que le temps de contact soit entièrement écoulé. Veuillez consulter les instructions pour plus de détails.

Fig. 1

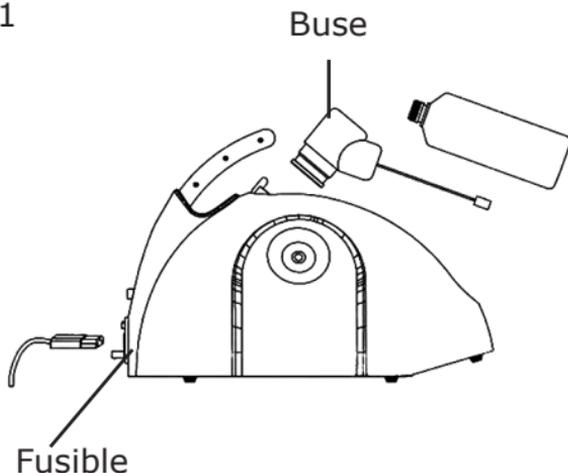

Si :

L'appareil ne s'allume pas et le voyant lumineux vert de l'interrupteur reste éteint.

Essayez ceci :

- Vérifiez que l'appareil est bien branché et que la prise fournit le courant nécessaire.
- Vérifiez que le fusible à l'arrière de l'appareil n'est pas endommagé (fig. 1).

L'appareil fonctionne mais la consommation de Nocolyse est plus basse ou plus élevée qu'attendu.

- Vérifiez que la buse est en place et qu'elle n'est pas obstruée (fig. 1).
- Vérifiez que le volume soit réglé correctement selon le volume de la pièce à traiter.
- Discutez de toute variation significative de volume avec votre représentant AMG.

Spécifications techniques

Appareil Nocospray 1000 m³

Modèle : 007-020

Puissance électrique : 1000 W

Voltage : 115 V

Capacité du réservoir : 1 litre

Poids (plein) : 6,5 kg

Poids (vide) : 5,8 kg

Dimensions : 50 cm x 33 cm x 37 cm

Garantie

Garantie limitée de 1 an sur le système Nocospray par MedPro Defense®

A.M.G. Medical Inc. garantit ce système contre les défauts de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation abusive du produit ni l'usure normale. L'utilisation de l'appareil Nocospray avec un liquide autre que Nocolyse annule la présente garantie. Toute réparation, modification ou utilisation de pièces autres que celles fournies par A.M.G. Medical aura aussi pour effet d'annuler cette garantie.

La garantie d'A.M.G. Medical ne s'applique qu'à l'utilisateur original.

Pour en savoir plus sur les garanties prolongées, les contrats d'entretien et les réparations, veuillez communiquer avec votre représentant AMG.

Questions ?

1-800-361-2210

www.nocospray.ca OU
www.medprodefense.com