

FeverBUGZ®

Timbres thermo-indicateurs

Fever-Bugz® est un timbre thermo-indicateur qui vous permet de surveiller l'évolution de la température de votre enfant pendant 48 heures.



Comment fonctionnent les Fever-Bugz® ?

Les timbres Fever-Bugz® utilisent la technologie des cristaux liquides capsulés pour afficher la température du corps au degré Celsius près.

Fever-Bugz® est la solution idéale pour la surveillance de la température parce qu'il est :

- Rapide, efficace et sûr
- Précis à $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- Visible en un coup d'œil
- Hypoallergénique

L'utilisation du Fever-Bugz®


Étape 1: Application rapide et sécuritaire

Détacher de l'endos de la bande protectrice en plastique et appliquer directement sur la peau. Pour plus de précision, placer sur le front. Fever-Bugz® peut aussi être utilisé sous les aisselles, sur la poitrine ou entre les omoplates.

Étape 2 : Résultats visibles en quelques secondes

Après quelques secondes, Fever-Bugz® affichera « N » (pour normal), « 37° », « 38° », « 39° » ou « 40° » (ou plus). La température correspond au nombre qui affiche la plus grande intensité de vert. Si aucun nombre n'apparaît vert, la température sera entre celle indiquée en brun et celle indiquée en bleu. La température axillaire normale se situe entre 36,1°C et 37,2°C.

Selon le type de peau, l'emplacement ou le degré d'activité, Fever-Bugz® peut demeurer sur la peau jusqu'à 48 heures. Le retirer puis le remettre en diminue l'adhésivité.

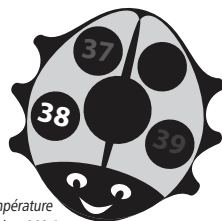

Étape 3: Se retire facilement et sans douleur

Lorsque la surveillance continue n'est plus utile, détacher délicatement et jeter. **NE PAS RÉUTILISER.**

ATTENTION ! Risque d'étouffement. Ranger hors de la portée des jeunes enfants. Recommandé pour les enfants âgés de 12 mois et plus. Fever-Bugz® est un timbre thermo-indicateur. Utilisez toujours un thermomètre pour vérifier les prises de température. Les timbres thermo-indicateurs Fever-Bugz® ne doivent pas remplacer une visite chez le médecin.

Pour des lectures précises, découvrez la gamme de thermomètres Physio Logic®.

Les enfants et les parents aimeront Fever-Bugz®, le timbre thermo-indicateur pratique et facile à utiliser qui permet de surveiller la température corporelle. Et, pour des lectures rapides et précises, utilisez un de nos thermomètres digitaux Accuflex® ou Quick Scan™.

Caractéristiques	Fever-Bugz® Timbre thermo-indicateur	Accuflex® Thermomètres numériques flexibles	Quick-Scan™ Thermomètre à balayage rapide
Vitesse	En un coup d'oeil	5 ou 10 secondes*	0.1 seconde
Précision	$\pm 0.5^\circ\text{C}$	$\pm 0.1^\circ\text{C} / 0.2^\circ\text{F}$	$\pm 0.2^\circ\text{C} / 0.4^\circ\text{F}$
Confort	Doux, sécuritaire, aimé des enfants	Pointe douce et flexible	Mesure dans l'oreille ou sur le front
Hygiène	Jetable	Lavable	Lavable
Pratique	48 heures de surveillance continue	6 fois plus rapide (qu'un thermomètre numérique conventionnel)	Aucun protège-sonde n'est requis

* Résultats cliniques moyens pour Accuflex 10 : relevé rectal 10,2 secondes, relevé oral 15,2 secondes, relevé aux aisselles 20,8 secondes. Les résultats cliniques varient entre 9,75 à 28,0 secondes. Résultats cliniques moyens pour Accuflex 5 : oral 5,6 secondes, relevé rectal 10,2 secondes, relevé aux aisselles 6,9 secondes.