

# QUATTRO®



*Avez-vous besoin d'un macérateur qui offre un meilleur écoulement par les drains et une plus longue période d'utilisation ?*

Locaux :

**Réduction des interventions d'entretien**

Prévention des infections :


**Requiert un temps d'opération supérieur**

Les gants, les lingettes et autres grosses particules ne doivent pas être déposés dans les drains. Ils peuvent provoquer des obstructions et entraver la prestation de soins, ce qui entraîne le dysfonctionnement des macérateurs, des travaux d'entretien supplémentaires ou des interventions, un risque d'infection plus élevé et la possibilité de fermeture de la salle.

Les macérateurs de bassin de lit de qualité sont conçus pour éliminer les produits en pulpe dans les drains sous une forme finement macérée, généralement de 2 à 4 mm.

Cette configuration fait toute la différence : elle améliore la libre circulation de l'eau dans les drains tout en empêchant les corps ne pouvant être macérés d'y pénétrer.

La conception et la construction de haute qualité des macérateurs Haigh, ainsi que la petite ouverture par laquelle les matières doivent passer avant d'atteindre les drains, font de Haigh Quattro le meilleur macérateur de sa catégorie.

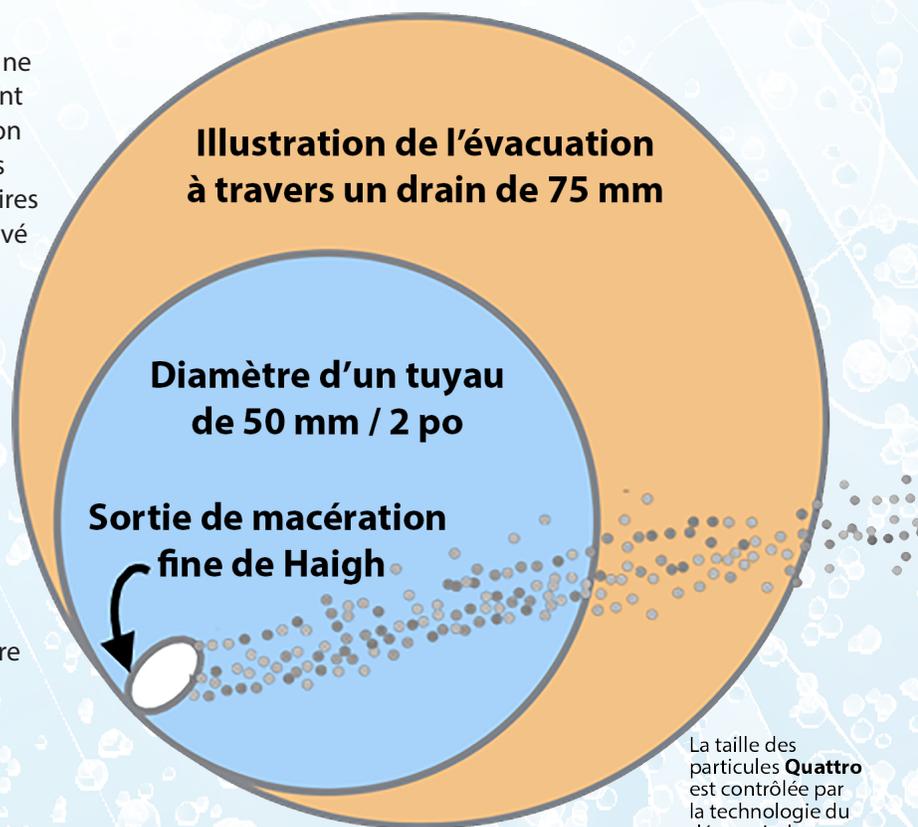

La taille des particules **Quattro** est contrôlée par la technologie du déversoir de mesure

# QUATTRO®



*Avez-vous besoin d'un macérateur qui offre un meilleur écoulement par les drains et une plus longue période d'utilisation ?*

Saviez-vous que,  
**les lames du Quattro de Haigh passent les fentes de découpe 280 fois par seconde?**

*Un rendement sans précédent pour maintenir un écoulement continu des drains.*



**Macération fine :**  
Orifices de 5 mm.  
Produits solides typiques inférieurs à 2 mm.  
Meilleur écoulement à travers le drain.

La macération ultrafine et la technologie de drainage brevetée du **Quattro Vanguard de Haigh et Medpro Defense** assurent un excellent rendement. Les particules en pulpe sont évacuées à travers des fentes de découpe de 5 mm, ce qui limite leur taille.

La pulpe finement macérée est rincée par la suite dans les drains pendant la majeure partie du cycle. Cet écoulement régulier maintient la pulpe en mouvement, sans risquer de voir l'eau « s'écouler » par-dessus les produits solides.

---

*« Nous avons installé le Quattro il y a maintenant trois semaines, et nous n'avons pas encore enregistré d'obstructions. Il a été installé dans une salle où, d'habitude, au moins une obstruction a lieu chaque semaine. »*

**Gestionnaire des locaux de NHS**

# QUATTRO<sup>®</sup>



*Envisagez-vous d'effectuer des travaux de réaménagement de vos salles d'élimination des déchets ?*

Prévention des infections :

**Technologie à ions argent pour une protection antibactérienne durable.**

Surface protégée par **Biomaster**

Les bactéries se déposent sur la **surface Biomaster ...**

elles ne peuvent pas survivre.

**Protection permanente des produits.**

**1** La **liaison** entre Biomaster et la cellule **perturbe la croissance de bactéries.**

**2** Les ions Biomaster **interfèrent** avec la production d'enzymes, ce qui **empêche la cellule de produire de l'énergie.**

**3** Biomaster **interrompt** l'ADN cellulaire, **empêchant ainsi le processus de réplication**

**HAIGH**

et

**MedPro DEFENSE<sup>®</sup>**

**AMG**  
MEDICAL  
[www.amgmedical.com](http://www.amgmedical.com)

A.M.G. Medical Inc.  
8505 Dalton, Montréal, QC H4T 1V5  
Canada • 1-800-363-2381

AMG Medical, Inc.  
8396 State Route 9, West Chazy,  
NY 12992, USA • 1-888-412-4992

# QUATTRO®



*Envisagez-vous d'effectuer des travaux de réaménagement de vos salles d'élimination des déchets ?*

Locaux :

**Libérer de l'espace lors du remplacement d'appareils.**

Prévention des infections :

**Offrir plus d'espace au personnel infirmier.**

**Empreintes alternatives  
Maximisées**

Pour un seul  
**bassin**, avec un  
encombrement  
minime

Choisissez  
**Solo  
de Haigh**

340 mm x 445 mm

**Empreintes alternatives**

Pour **plusieurs  
bassins**, avec un  
encombrement  
réduit

Choisissez  
**Quattro Vanguard  
de Haigh et  
Medpro Defense**

411 mm x 524 mm

# QUATTRO®




*Envisagez-vous d'effectuer des travaux de réaménagement de vos salle d'élimination des déchets ?*

Personnel des soins :  
**Il est plus agréable à utiliser.**


Prévention des infections :  
**Réduction des risques d'égratignures et de déversements.**

*(Un chargement à une hauteur plus basse permet de réduire les projections sur les cuvettes de 3 l)*

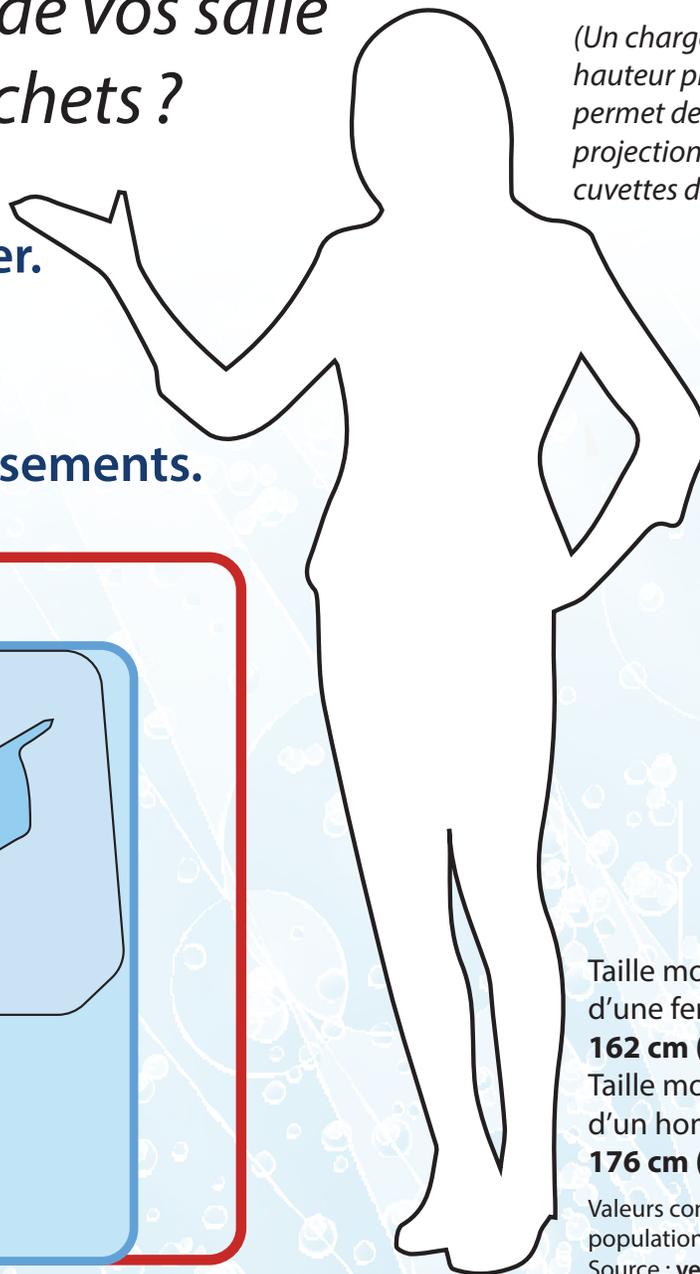

Illustrative: **90 cm**

Quattro: **79 cm**  
(hauteur de chargement)

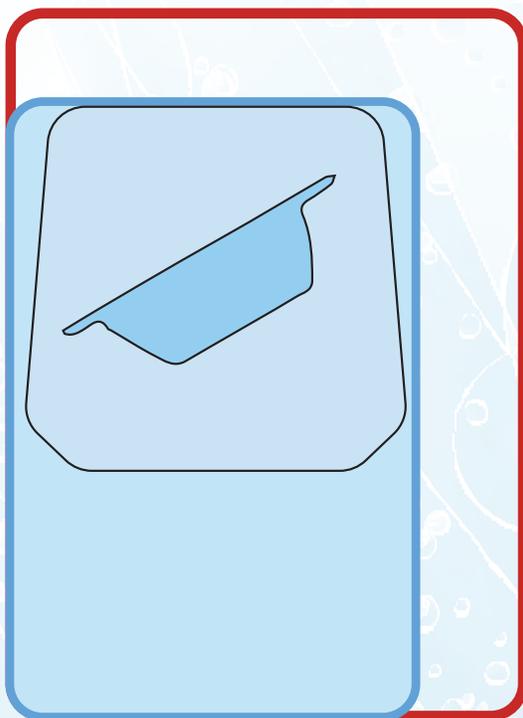

Taille moyenne d'une femme :  
**162 cm (5,3")**  
Taille moyenne d'un homme :  
**176 cm (5,8")**

Valeurs concernant la population américaine  
Source : [verywellfit.com](http://verywellfit.com)